



SupremeMotors

Москва, Самокатная, 4, влд.40
+7(926) 013 00 05
www.unawheel.ru
go@unawheel.ru



Электрическая приставка к инвалидному креслу UNAwheel



Инструкция по эксплуатации

Модель: v.1

ООО «СупримМоторс»
2018г.

Технические характеристики

Материал рамы	Алюминий, сталь
Мотор-колесо	36V, 250W, бесщеточный, редукторный
Батарея	Li-ion 7640mAh, 36V
Зарядное устройство	АС 110-240V, 2A для Li-ion батарей
Покрышка, камера	12,5"
Скорость	1 скорость - до 15км/ч, 2 скорость - до 20км/ч, 3 скорость - до 23км/ч, - 1 скорость – движение назад.
Тормоз	Дисковый, электронный с рекуперацией
Фара	Диодная со звуковым сигналом
Дисплей	Цифровой, модель LCD005
Ручка газа	Поворотный, половинчатый
Ручка тормоза	Рукоятка нажимная широкая со стояночным тормозом
Совместимость	Кресла-коляски активного типа с несъёмной подножкой, прямыми передними трубами круглого сечения диаметром 20-30мм

Крепление приставки к креслу-коляске

1. Сесть в кресло и подъехать к приставке так, чтобы зажимы оказались перед передними трубами кресла-коляски, поставить коляску на тормоза;
2. Отрегулировать размер зажимов винтами так, чтобы в зажатом положении, можно было плотно зажать раму коляски;
3. Выставить высоту зажимов так, чтобы они обхватывали трубы коляски под прямым углом;
4. Убедиться, что приставка стоит точно по середине кресла, а зажимы находятся на одинаковом уровне;
5. Закрепить зажимы;
6. Оттолкнуть руль от себя, приподнимая передние колеса коляски на 1 или 2 щелчка. Передние колеса должны подняться на 2-5см;
7. Закрутить винт центрального механизма до конца;
8. При необходимости отрегулировать высоту и наклон руля;
9. При необходимости отрегулировать расстояние до руля, изменяя конфигурацию дуг крепления;
10. Нажать центральную кнопку дисплея 5сек для включения;
11. Стрелками вверх и вниз выбрать скорость 1;
12. Аккуратно и плавно повернуть ручку газа для начала движения;
13. Направление движение задается поворотами руля;
14. Торможение осуществляется плавным нажатием ручки тормоза.

Отсоединение приставки от кресла-коляски

1. Нажать центральную кнопку дисплея 5сек для выключения;
2. Поставить коляску на тормоза;
3. Выкрутить на 1см винт центрального механизма;
4. Одной рукой немного оттолкнуть руль от себя, одновременно второй рукой нажать на рычаг центрального механизма, после этого плавно опустить руль на колени. Передние колеса коляски должны встать на землю;
5. Закрутить винт центрального механизма;
6. Отсоединить зажимы приставки от коляски;
7. Отодвинуть приставку от коляски.



Внимание

- Не допускать резких торможений!
- При необходимости использовать тормоз приставки и кресла-коляски!
- Не нажимать ручку газа резко!
- Не совершать резких поворотов на скорости выше 3 км/ч!
- Хранить и заряжать в сухом помещении с температурой 10-30 градусов Цельсия
- Использовать при температуре от -5 до + 30 градусов Цельсия
- Не разбирать!
- Не допускать коротких замыканий!
- Не бросать!
- Дисплей хрупкий!
- Устройство не является водонепроницаемым!
- Избегать намокания!
- Максимальная скорость на дороге общего пользования зависит от местных правил!
- Скорость более 6 км/ч разрешена только на частной территории!
- ООО «СупримМоторс» не несет ответственность за несоблюдение правил дорожного движения!